

Zagreb, 18. veljače 2010.

Poštovani korisnici,

ovom obavijesti upozoravamo o mogućem zdravstvenom riziku radi dugotrajne, prekomjerne upotrebe Corega Extra Strong kreme za pričvršćivanje zubne proteze koja sadrži cink. Kao mjeru predostrožnosti, GSK je dobrovoljno zaustavio proizvodnju, distribuciju i oglašavanje ovog proizvoda.

U GSK-u, sigurnost korisnika je naša najveća briga. GSK kontinuirano prati svu najnovije izdanu stručnu literaturu i štetne događaje za koje primamo prijave, a u svezi su s našim proizvodima. Postoje razni izvori iz kojih dobivamo cink i on je esencijalni dio uravnotežene prehrane. Ipak, u 2009. godini primili smo povećan broj prijava nuspojava na Corega Extra Strong kremu za pričvršćivanje zubne proteze koja sadrži cink. Novoobjavljena stručna literatura sugerira na to da prekomjerna upotreba proizvoda koji sadrže cink, posebice kroz nekoliko godina, može dovesti do nakupljanja visokih koncentracija cinka u organizmu što se povezuje s nastankom neuroloških simptoma, kao što su ukočenost (omamljenost), šum u ušima i slabost u rukama i nogama, poteškoće s hodanjem i ravnotežom, te krvni poremećaji kao što je anemija. Prijave takvih nuspojava su vrlo rijetke, uzevši u obzir da nekoliko milijuna ljudi koristi ovaj proizvod.

Važno je napomenuti da se cink ne apsorbira kroz usta, već samo kada se proguta. Prilikom normalne upotrebe kreme za pričvršćivanje zubne proteze dolazi do gutanja manje količine kreme što nije štetno.

Corega Extra Strong krema za pričvršćivanje zubne proteze koja sadrži cink je sigurna za upotrebu ako se koristi kao što je opisano u uputi za upotrebu, na pakovanju proizvoda (vidi ispod). Većina korisnika slijedi upute za upotrebu. Ipak, neki korisnici upotrebljavaju više kreme za pričvršćivanje zubne proteze nego što se preporučuje i koriste ju više od jednom dnevno, najčešće radi zubnih proteza koje loše prijanjaju.

Što korisnici trebaju učiniti

- 1. Oni koji su koristili proizvod u skladu s uputama, mogu sigurno nastaviti tako ga koristiti i dalje. Provjerite da li koristite proizvod kako je opisano na pakovanju:**

“Za čvrsto prijanjanje nanesite kremu jednom na dan. Započnite s malom količinom kreme.

Korištenje prevelike količine kreme za pričvršćivanje zubne proteze može dovesti do izlaženja kreme izvan proteze. U slučaju da krema izađe izvan proteze, slijedeći put smanjite količinu koju nanosite. Tuba treba potrajati 3 tjedna za tubu koja sadrži 40 g kreme. Ako potrošite kremu prije navedenog perioda, to može značiti da Vam proteza loše prijanja. Posjećujte redovito svog stomatologa. Redoviti stomatološki pregledi su dio pravilne oralne higijene i nužni su za provjeru prijanjanja Vaše zubne proteze.”

2. Ako ste koristili Corega Extra Strong kremu za pričvršćivanje zubne proteze nekoliko godina i u većim količinama od preporučenih na pakovanju, na primjer

- koristite kremu za pričvršćivanje zubne proteze više od jednom na dan ili
- tuba od 40 g kreme Vam traje manje od 3 tjedna ili
- ako ste zabrinuti za svoje zdravlje,

Vi morate:

- Prestati koristiti proizvod.
- Posavjetovati se sa svojim liječnikom.
- Koristiti kremu za pričvršćivanje zubne proteze koja ne sadrži cink.

Korisnici koji imaju pitanja mogu nas kontaktirati u GSK na broj telefona 01 6051 903.

Ukoliko želite više informacija o kremi za pričvršćivanje Corega Extra Strong, potražite ih na internet stranici www.gsk.com.

Dodatak

Cijela uputa za sigurnu i pravilnu upotrebu:

Corega Extra Strong krema za pričvršćivanje zubne proteze omogućuje sigurno prijanjanje cijeli dan. Za čvrsto prijanjanje nanosite kremu jednom na dan. Prilikom upotrebe previše kreme za pričvršćivanje krema može izaći iz proteze pa prilikom prve upotrebe počnite s malom količinom kreme. U slučaju da krema ipak izađe iz proteze, slijedeći put smanjite količinu koju nanosite. Tuba treba potrajati 3 tjedna za tubu koja sadrži 40 g kreme. Ako potrošite kremu prije navedenog perioda, znači da koristite previše kreme. Korištenje previše kreme za pričvršćivanje može biti znak loše prijanjanje zubne proteze. U tom slučaju prestanite s upotrebom kreme za pričvršćivanje te posjetite svog stomatologa kako biste provjerili prijanjanje svoje proteze.

Kako se nanosi krema za pričvršćivanje

1. Očistite i osušite zubnu protezu.
2. Nanesite kremu u kratkim trakama, ali ne preblizu rubu zubne proteze.
3. Isperite usta prije namještanja zubne proteze.
4. Stavite protezu na mjesto, držite čvrsto i zagrizite na nekoliko sekundi.
 - Poklopac i vrh tube moraju ostati suhi kako se otvor ne bi začepio.

Kako se vadi zubna proteza

1. Usta isplahnite vodom.
2. Laganim pokretima olabavite protezu i polako ju izvadite iz usta.
3. Toplom vodom i mekanom zubnom četkicom s proteze i iz usta uklonite ostatke kreme za pričvršćivanje.
4. Za temeljito čišćenje zubne proteze koristite sredstva za čišćenje zubne proteze.

Važne informacije o proizvodu:

- Ovaj proizvod sadrži cink. Ako dnevno uzimate nadomjestke cinka razgovarajte s liječnikom ili stomatologom prije uporabe ovog proizvoda.
- Nemojte upotrebljavati proizvod ako ste osjetljivi ili imate reakciju na bilo koji sastojak kreme. Ako osjetite neugodu prekinite s uporabom.
- Ako se koristi kao što je navedeno u uputama, može doći do gutanja manjih količina proizvoda, no to nije štetno.
- Potrebno je proizvod koristiti samo onako kako je opisano. Gutanje veće količine ovog proizvoda tijekom dužeg vremenskog razdoblja, zbog povećanog unosa cinka, može rezultirati učincima po zdravlje.

Corega Extra Strong krema za pričvršćivanje koja sadrži cink:



Corega Neutral, krema za pričvršćivanje koja ne sadži cink:

